

UTILISATION ET ENTRETIEN DES PROTECTIONS pour BLOC OPERATOIRE EN AKTON®

NETTOYAGE DESINFECTION

Protocole SPRAY / ESSUYAGE / RINÇAGE

- 1) **VAPORISER** : Tous les produits usuels peuvent être utilisés, sauf ceux contenant plus de 40% d'alcool ou un principe actif fort non dilué.
- 2) **ESSUYER** avec soin.
- 3) **RINCER régulièrement à l'eau claire** pour enlever tout résidu de désinfectant qui pourrait dégrader le film et irriter la peau du patient.

Remarque : les protections tachées par des produits à base de PVP I2, type Betadine, peuvent être nettoyées immédiatement à l'eau très froide ou après un court délai au bisulfite ou au thiosulfate de sodium.



MISES EN GARDE

- 1) Ne pas **AUTOCLAVER**.
- 2) Ne pas **STERILISER** à l'**OXYDE d'ETHYLENE**.
- 3) Ne pas **LAVER EN MACHINE**.
- 4) Ne pas **FAIRE TREMPER** plus de 10 min.
- 5) En cas d'**UTILISATION D'ADHÉSIFS** sur les protections, il est nécessaire d'**UTILISER UNE HOUSSE** sur le billot ou la protection, car le film n'est pas fait pour résister à l'action mécanique de coller et décoller, ni à l'agression chimique de la colle.



REPARATION

Le polymère viscoélastique AKTON® ne coule pas, même si son film protecteur est endommagé. En cas de déchirure, utiliser nos kits 002 (10 x 10 cm) ou 003 (90 x 10 cm), film PU extensible :

- 1) Nettoyer et sécher la partie à réparer.
- 2) Couper une pièce débordant de 1 cm autour de l'accroc et en arrondir les angles.
- 3) Oter la pièce de protection et coller la pièce.
- 4) Coller en commençant par une extrémité pour éviter bulles et plis.

